

VITA VACUMAT® New Generation

Koncepcja systemu




VITA pobór koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 06.09

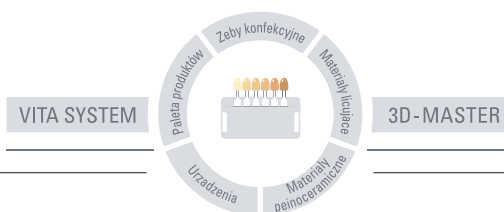

VITA

VITA VACUMAT® New Generation -perfekcja powiązana z indywidualnością



Modułowa budowa gwarantującą wysokiej wydajności


Wydajność to od lat hasło sztandarowe firmy VITA. Piec VITA VACUMAT „New Generation” potrafi sprostać wszystkim wymogom nowoczesnej techniki napalania ceramiki i jednocześnie optymalizuje procesy produkcyjne. Jedyna w swoim rodzaju nowatorska koncepcja modułowej budowy zezwala użytkownikowi indywidualnie dobrać właściwe komponenty systemu napalania ceramiki.



System obejmuje jednostkę napalania Premium VACUMAT 6000 M, trzy elementy obsługi oraz dodatkowy osprzęt. Elementy obsługi: vPad easy, vPad comfort i vPad excellence potrafią sprostać każdym wymaganiom. Jeden element obsługi jest w stanie sterować aż czterema jednostkami napalania ceramiki.

Użytkownik sam decyduje o wyborze modułów, które na daną chwilę potrzebuje oraz w każdym momencie może rozszerzyć swój system o dalsze komponenty takie jak: jednostka napalania ceramiki, element obsługi i osprzęt. Nowy system firmy VITA optymalnie rozwiąże potrzeby każdego laboratorium, a więc każda napalona praca gwarantuje wzrost wydajności i jakości Państwa pracowni.

VITA VACUMAT® 6000 M Premium jako standard

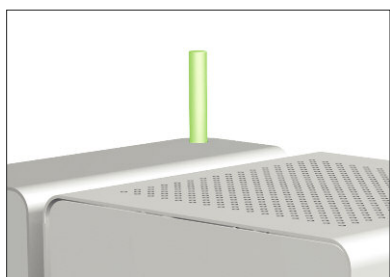


Zdjęcie sygnalizatora LED

Jednostka napalania i jej atuty

Jakość firmy VITA nie zna różnic. Niezależnie od tego na jaki element obsługi Państwo się zdecydują, piec VITA VACUMAT 6000 M będzie znajdował się w wyposażeniu. W pełni zautomatyzowana i sterowana mikroprocesorami jednostka napalania nadaje się świetnie do napalania wszystkich mas ceramicznych znajdujących się na rynku dentystycznym. Piec cechuje znakomita funkcjonalność, wysoka jakość napalania ceramiki, komfort obsługi oraz wysoka wydajność. Forma użytkowa pieca VITA VACUMAT 6000 M to wyraz znakomitej estetyki i funkcjonalności

Dopracowany w każdym detalu

- Rozpoznawalny tryb pracy dzięki sygnalizatorowi świetlnemu LED oraz dowolny wybór sygnału akustycznego
- Nowatorska technika napalania jak również znakomita komora napalania, do której budowy zastosowano materiały najwyższej jakości – jednorodne przenoszenie ciepła na napalany obiekt.
- Mufla kwarcowa (made in Germany) i niezawodny system elektroniczny gwarantujący jednakowe wyniki napalania.

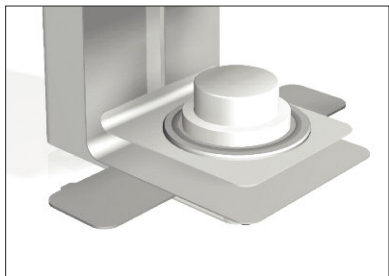

Zdjęcie szczegółowe stolików do napalonych prac

- Programy kontrolne i serwisowe gwarantują maksymalny komfort pracy, którego efektem jest najwyższa jakość wykonywanych prac.
Piec posiada następujące funkcje:
 - automatyczne nastawianie temperatury przy starcie programu
 - ochrona przed spadkiem napięcia, tryb nocny, kontrola szybkiego chłodzenia, automatyczne czyszczenie
 - automatyczne wykluczenie kondensacji wody, stała jakość napalanej ceramiki
 - ergonomiczna i nowoczesna forma urządzenia minimalizuje powierzchnię użytkową
 - dwa zespolone stoliki do odstawiania napalonych prac

Dodatkowy osprzęt gwarancją znakomitej funkcjonalności i indywidualności

Cichy, indywidualny i praktyczny – osprzęt urządzenia VITA VACUMAT 6000 M podnosi w każdym stopniu system napalania. Pompa próżniowa posiada w wyposażeniu dźwiękochłonną obudowę, która w znacznym stopniu redukuje poziom szumów. Kolorowe zaślepki znakomicie korelują z całością obudowy urządzenia VITA VACUMAT 6000 M, mogą służyć jako powierzchnie do sporządzania notatek i ułatwiają przyporządkowanie dodatkowych jednostek napalania ceramiki w czasie działania. Zespolone stoliki zezwalają na optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej.



VITA vPad - elementy obsługi w trzech różnych wariantach

VITA vPad easy



VITA vPad comfort




VITA VACUMAT "New Generation" to klucz do jeszcze większego sukcesu. Za właściwe sterowanie jednostki napalania VITA VACUMAT 6000 M odpowiedzialne są do wyboru trzy różne elementy obsługi: vPad easy, vPad comfort i vPad excellence. Ww. elementy obsługi posiadają symbole, które obsługujemy intuicyjnie. Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu wszystkie niewłaściwie wprowadzone dane zostają natychmiast skorygowane i automatycznie dopasowane.

Czy dla racjonalnie myślących praktyków, którzy chcą uzyskać perfekcyjne wyniki napalania, czy dla indywidualistów, którzy wolą ekskluzywność i komfort VITA vPads sprosta każdym wymaganiom. Dzięki piecowi Premium VITA VACUMAT 6000 M użytkownik osiągnie za pomocą wszystkich elementów obsługi optymalne wyniki napalania ceramiki. Jednocześnie vPad easy, vPad comfort i vPad excellence gwarantują odpowiednie sterowanie aż czterema jednostkami napalania (do obsługi aż czterech jednostek napalania wystarczy jeden element obsługi – wybór należy do Państwa). Dodatkowy zakup pieców do napalania ceramiki z serii VITA VACUMAT 6000 M pozwala na zastosowanie tylko jednego elementu obsługi i jest gwarancją na znakomitą jakość i wydajność.

VITA vPad excellence



Rationalny VITA vPad easy

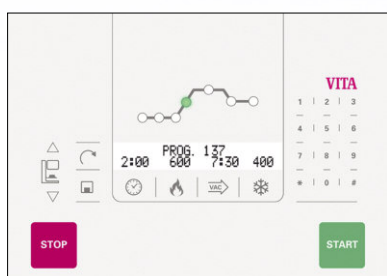


“Koncentracja na najważniejszym” to długoletnia tradycja w firmie VITA. Również w przypadku nowego vPad easy możemy zastosować to motto. Ww. element obsługi posiada wszystkie funkcje i programy napalania, które znajdziemy w menu obsługi, które posiada symbole wybierane intuicyjnie. vPad easy przekonuje swoją łatwą obsługą i gwarantuje znakomite wyniki w napalaniu ceramiki.

Wyposażenie i funkcje

- duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, klawiatura z okrywą foliową
- do wyboru 200 ponumerowanych programów
- ochrona danych dzięki wprowadzeniu kodu
- uaktualnienie oprogramowania przez port USB
- pewne sterowanie temperaturą i przebiegiem programów poprzez system elektroniczny „State of the Art”
- do dyspozycji wszystkie funkcje kontrolne i serwisowe takie jak:
 - ochrona przed spadkiem napięcia
 - automatyczne nastawianie temperatury w czasie startu programu
 - szybkie chłodzenie do temperatury Stand by (gotowość do działania)
 - wybór dowolnej pozycji windy dla podsuszania i chłodzenia
 - licznik godzin pracy

VITA vPad comfort - wyjątkowo komfortowy

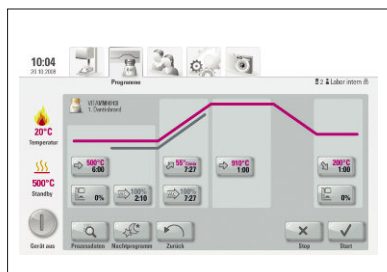

VITA vPad comfort

Komfort wyraża się przede wszystkim w łatwości użytkowania i ergonomicznym działaniu urządzenia. Takim przykładem jest vPad comfort. Za pomocą tego elementu obsługi możemy wygodnie sterować dwoma elementami napalania z serii VITA VACUMAT 6000 M. W systemie obsługi znajduje się możliwość wyboru kont dla czterech użytkowników oraz możliwość indywidualnego nastawienia procesów roboczych. Wszystkie dane użytkowników można bez problemu przenieść na inny element obsługi. Jednocześnie vPad comfort posiada kolorowy ekran dotykowy z dobrą strukturą widoku folderów oraz samoobjaśniające menu programowe (cała obsługa przebiega „on touch”).

Wyposażenie i funkcje


- Sterowanie dwoma jednostkami napalania za pomocą jednego elementu obsługi
- 7 calowy kolorowy ekran dotykowy z intuicyjną obsługą menu
- przeglądarka 1GB z różnymi funkcjami
- możliwość nastawienia 500 programów napalania ceramiki
- możliwość instalacji indywidualnych i przenośnych kont użytkowników
- ochrona hasła – wolny wybór hasła
- uaktualnienie oprogramowania przez port USB oraz przesyłanie danych
- administracja, kontrola i funkcje serwisu plus takie dodatki jak:
 - zbieranie danych w celu zabezpieczenia jakości
 - łatwa administracja wszystkich danych dotyczących: napalania, urządzenia i użytkownika
 - możliwość wprowadzania zmian w czasie działania programu
 - licznik godzin pracy dla całego urządzenia i dla mufl
 - nocny tryb pracy, automatyczne wykluczenie kondensacji wody w materiale izolacyjnym oraz funkcja automatycznego czyszczenia

VITA vPad excellence - wyjątkowo ekskluzywny



VITA vPad excellence

Najwyższe wymagania to normy VITA. Tego może dowieść VITA vPad excellence. Urządzenie integruje funkcjonalność, komfort i ekskluzywność. Element obsługi posiada duży i kolorowy ekran dotykowy z przeglądarką. Za pomocą elementu vPad excellence możemy obsługiwać aż cztery elementy napalania z serii VITA VACUMAT 6000 M i zainstalować konta dwunastu użytkowników. Kto napala dużo ceramiki ten na pewno skorzysta z tak wielu opcji i dodatkowych funkcji ww. urządzenia.

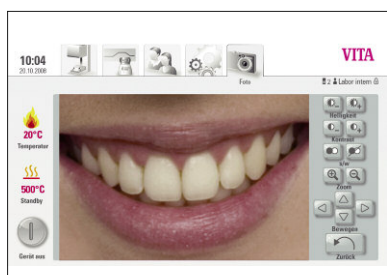

Wyposażenie i funkcje

- możliwość sterowania jednym elementem obsługi aż czterema elementami napalania ceramiki
- możliwość nastawienia 1000 programów napalania ceramiki
- 8,5 calowy kolorowy ekran dotykowy z intuicyjną obsługą oraz samo-objaśniające menu programowe (cała obsługa przebiega „on touch”).
- Dokładny przegląd programów i zaprogramowanie wybranych materiałów ceramicznych, programy napalania, profil użytkownika i łatwa koordynacja działania podłączonych elementów napalania
- 2 GB przeglądarka z możliwością obróbki zdjęć oraz łatwe zarządzanie danymi
- zintegrowany czytnik pamięci kart
- do dyspozycji wszystkie funkcje kontrolne i serwisowe takie jak w vPad comfort oraz wiele dodatkowych funkcji takich jak:
 - możliwość uruchomienia 12 kont użytkowników
 - ochrona indywidualnych danych poprzez program „Personal Data Protektion”
 - automatyczne nastawianie temperatury w czasie startu programu
 - dwa porty USB
 - możliwość podłączenia myszki i klawiatury PC ułatwia szybsze programowanie



VITA VACUMAT® New Generation - Moduły

	<p>Element obsługi VITA vPad easy</p> <p>Element obsługi posiada wszystkie funkcje i programy napalania. Menu obsługi posiada samoobjaśniające się symbole wybierane intuicyjnie. vPad easy przekonuje swoją łatwą obsługą i w połączeniu z jednostką napalania VITA VACUMAT 6000 M gwarantuje znakomite wyniki w napalaniu ceramiki.</p>
	<p>Element obsługi VITA vPad comfort</p> <p>Za pomocą tego elementu obsługi możemy wygodnie sterować dwoma elementami napalania z serii VITA VACUMAT 6000 M. W systemie obsługi znajduje się możliwość wyboru kont dla czterech użytkowników oraz możliwość indywidualnego nastawienia procesów roboczych. Wszystkie dane użytkowników można bez problemu przenieść na inny element obsługi.</p>
	<p>Element obsługi VITA vPad excellence</p> <p>Element obsługi posiada duży i kolorowy ekran dotykowy z przeglądarką. Za pomocą elementu vPad excellence możemy obsługiwać aż cztery elementy napalania z serii VITA VACUMAT 6000 M i zainstalować konta dwunastu użytkowników. Kto napala dużo ceramiki ten na pewno skorzysta z tak wielu opcji i dodatkowych funkcji ww. urządzenia.</p>
	<p>Jednostka napalania VITA VACUMAT 6000 M</p> <p>W pełni zautomatyzowana i sterowana mikroprocesorami jednostka napalania nadaje się świetnie do napalania wszystkich mas ceramicznych znajdujących się na rynku dentystycznym. Piec cechuje znakomita funkcjonalność, wysoka jakość napalania ceramiki, komfort obsługi oraz wysoka wydajność. Forma użytkowa pieca VITA VACUMAT 6000 M to wyraz znakomitej estetyki i funkcjonalności.</p>
	<p>Osprzęt</p> <p>6 kolorowych zaślepek znakomicie koreluje z całością obudowy urządzenia VITA VACUMAT 6000 M. Zespalone stoliki zezwalają na ergonomiczne wykorzystanie powierzchni użytkowej pieca.</p>
	<p>Osprzęt</p> <p>Białe zaślepki mogą służyć jako powierzchnie do sporządzania notatek i ułatwiają przyporządkowanie dodatkowych jednostek napalania ceramiki w czasie działania. Komplet cyfr magnetycznych od 1 do 4 ułatwia właściwe przyporządkowanie jednostek napalania ceramiki w przypadku zastosowania wielu pieców.</p>

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Perfekcyjnie dobrane akcesoria

	<p>VITA Easyshade® Compact</p> <p>Spektrofotometryczna technologia urządzenia pomiarowego VITA Easyshade Compact umożliwia w przeciągu chwili jednoznaczne i precyzyjne określenie naturalnego koloru zęba jak również kontrolę koloru w uzupełnieniach protezycznych. Bezprzewodowy VITA Easyshade Compact posiada możliwość zapisu w pamięć 25 pomiarów. VITA Easyshade Compact działa wg. VITA SYSTEM 3D-MASTER oraz VITAPAN classical od A1 do D4.</p>
	<p>VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER®</p> <p>VITA Linearguide 3D-MASTER zezwala na jeszcze bardziej komfortowy pobór koloru. Kolory precyzyjnie określa jasność, intensywność i odcień koloru. VITA Linearguide 3D-MASTER jest alternatywą do sprawdzonego VITA Toothguide 3D-MASTER i posiada tylko jedną różnicę czyli liniowe przyporządkowanie próbek kolorów w postaci zębów konfekcyjnych.</p>
	<p>VITAVM®7</p> <p>Ceramika przeznaczona do licowania podbudów wykonanych z ceramiki tlenkowej w zakresie WRC od około 7,2 do 7,9.</p>
	<p>VITAVM®9</p> <p>Ceramika przeznaczona do licowania podbudów z tlenku cyrkonu w zakresie WRC do około 10,5. Ceramikę można używać również do indywidualizowania uzupełnień wykonanych z bloczków VITABLOCS jak również do uzupełnień wykonanych z ceramiki VITAPM 9 czyli krążków do tłoczenia.</p>
	<p>VITAVM®13</p> <p>Ceramika przeznaczona do licowania podbudów wykonanych ze stopów konwencjonalnych w zakresie WRC od 13,8 do 15,2.</p>
	<p>VITAVM®15</p> <p>Ceramika przeznaczona do licowania podbudów wykonanych ze stopów o uniwersalnym zastosowaniu w zakresie WRC od 16,0 do 17,3.</p>

Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów .



UWAGA!

Produkt ten został opracowany do ściśle określonego zastosowania. Dlatego też powinien być stosowany zgodnie z instrukcją.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu, jeżeli pragnie się go zastosować do innych potrzeb. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten nie będzie stosowany ze zgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych firm.

Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania: 06.09

US 5498157 A - AU 659964 B2 - EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com